

Браслеты от укачивания Трэвел Дрим



Минск, Беларусь

Для подавления синдрома укачивания и тошноты

Браслет акупунктурный ТрэвелДрим быстро и эффективно облегчает симптомы укачивания, тошноты, рвоты, головокружения, дискомфорта в области желудка, возникающие при:
морской болезни
авиаперелетах
поездках в автомобиле, поезде
при катании на аттракционах
во время беременности.

Способ применения

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию.
Расположить три пальца на запястье таким образом, чтобы безымянный палец находился на сгибе запястья.
Точка акупунктуры будет находиться под указательным пальцем между двумя сухожилиями запястья.
Пластиковый шарик браслета должен воздействовать непосредственно на эту акупунктурную точку на запястье.
Оденьте браслет при появлении симптомов укачивания и тошноты.
Для достижения максимального эффекта рекомендуется носить браслеты на обеих руках.
Браслет начинает оказывать воздействие через 2-5 минут, но наилучшего результата можно добиться при применении браслета непосредственно перед началом путешествия, до появления ощущения тошноты.

Время использования браслета не ограничено.

Не рекомендуется снимать браслет во время путешествия, так как это может вызвать появление симптомов укачивания. При сильной тошноте следует нажать на пластиковый шарик пальцем, что обеспечит быстрое подавление симптомов тошноты.

Цена: **160 000 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Иванова Марина

44-7863253