

## Ортез для иммобилизации коленного сустава (Тутор) 4030 ОррО



Минск, Беларусь

Б/У

15 y.e.

(29) 305 35 45

Назначение

Иммобилизирующий коленный тутор для реабилитации после перенесенных операций и травм.

Показание

Травмы коленного сустава, боли в коленном суставе различной этиологии.

Материал

Полиэстер, резина, нейлон, поролон, металлические шины, застежка (липучка).

Применение

Использовать изделие исключительно по назначению.

При правильном расположении ортеза на ноге надпатellarное отверстие должно находиться посередине коленной чашечки, а боковые шины строго по наружной и внутренней поверхностям коленного сустава. После надевания ортеза застегните все застежки.

Регулировка или изменение степени поддержки должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача.

Длительность ежедневного использования по рекомендации Вашего врача.

При возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему врачу.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов.

Нарушения кровоснабжения и венозного оттока в нижних конечностях.

Не рекомендуется надевать ортез после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Рекомендации по уходу за изделием

Стирать в прохладной воде, не использовать отбеливающих средств, не гладить, не подвергать химической чистке.

Перед стиркой следует застегнуть все застежки и удалить все вынимаемые шины.

Рекомендуется использовать специальный мешок для стирки.

Отжать мокрое изделие и оставить сушиться (не сушить вблизи нагревательных приборов).

Цена: **15 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**С Л А**

**+375293053545**

**Минск, ул.Мозырская,33**